


SORTERINGSGUIDE – Vision For All

VIKTIG!:

- 1: KUN ENSTYRKEBRILLER** (unntak svake skjermbriller med add maks 0.8D)
- 2: IKKE MER ENN 0.75D (sfærisk) I FORSKJELL MELLOM GLASSENE.**
- 3: IKKE MER ENN 0.75D I SYLINDER.**
- 4: SE TIL AT GLASSENE IKKE ER FOR RIPETE OG INNFATNINGEN IKKE DEFEKT.**
- 5: BRILLENE LEGGES I EN LÅSBAR PLASTPOSE PÅSKREVET STYRKE MED VANNFAST TUSJ.**
 - **PLUSS** MED SORT ELLER BLÅ TUSJ.
 - **MINUS** MED RØD TUSJ.
 - **HØRE ØYE: SKRIV OD / VENSTRE ØYE SKRIV OS**
 - **ER STYRKEN PÅ BEGGE GLASSENE LIKE: SKRIV OU**

EKSEMPLER:

OD: +1.50 -0.50x180 OS: +2.00 -0.75x160	OD: -5.00 OS: -4,75 -0.50x90	+2,50 OU
--------------------------------------------	---------------------------------	----------

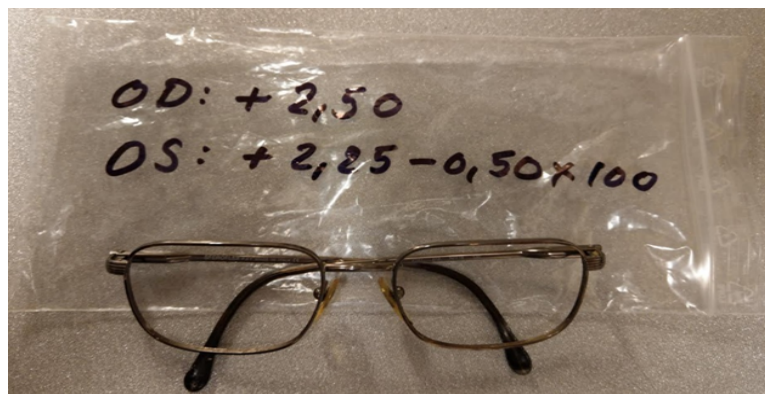

6: SOLBRILLER uten styrke eller eventuelt med styrke (ferdiglesebriller med RX).

NB: Alle briller MÅ vaskes! De justeres og repareres også etter behov.